


IHR ABSAUGGERÄT

Inspizieren Sie das Absauggerät und alle Teile vor der Verwendung.

! WARNUNG – Bei beschädigten oder fehlenden Teilen darf das Gerät nicht verwendet werden.

Modell 88 00 50 (siehe Abbildungen A1 und A2)

1. Bakterienfilter (nicht steril)
2. Verbindungsschlauch (zur Verwendung mit 800-ml-Behälter)*
3. Anzeigefeld (auf der Oberseite des Geräts)
4. Kniestück zum Anschluss des Schlauchs an das Gerät (zur Verwendung mit 800-ml-Behälter)
5. Vakuumanzugöffnung (an der Seite)
6. Angebundener Stopfen
7. Haltebügel für Behälter (nur zur Verwendung mit 800-ml-Behälter)*
8. 800-ml-Einwegbehälter mit Deckel
9. 90°-Kniestück zum Anschluss des Schlauchs an den Behälter
10. Vakuumreglerknopf (an der Seite)
11. DC (Gleichstrom)-Eingang (an der Seite)
12. Batteriefach
13. Tragegriff/Katheterhalterung

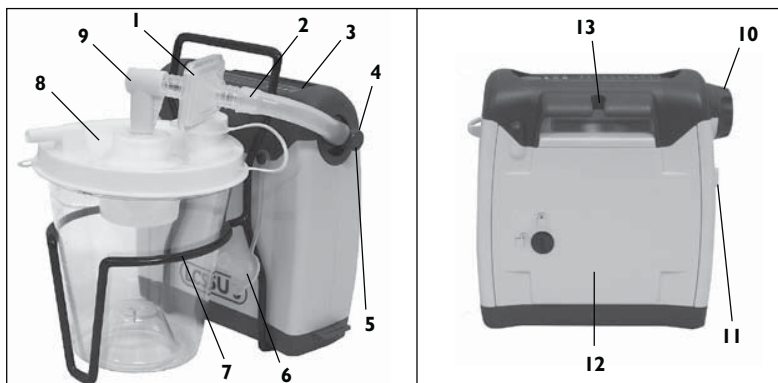


Abbildungen A1 und A2 - Modell 88 00 50

*Nur Laerdal-Ersatzteil Nr. 88 49 05 verwenden

Modell 88 00 60 (siehe Abbildungen B1 und B2)

1. Anzeigefeld (auf der Oberseite des Geräts)
2. Vakuumanzugöffnung (an der Seite)
3. 300-ml-Einwegbehälter mit 0,9 m langem Patientenschlauch und internem Bakterienfilter mit Flüssigkeitsabsperrentil
4. Behälterschlauchstutzen zur Entsorgung
5. Angebundener Stopfen
6. 12 Volt DC (Gleichstrom)-Eingang (an der Seite)
7. Vakuumreglerknopf
8. Batteriefach
9. Tragegriff/Katheterhalterung
10. AC/DC-Adapter/Ladegerät und Netzkabel (nicht gezeigt)
11. Wiederaufladbare Batterie hoher Kapazität, 12-Volt DC Ni-MH-Batterie (nicht gezeigt)

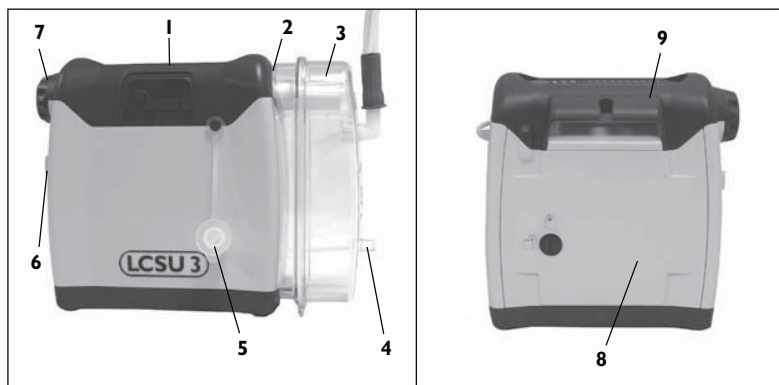

Abbildungen B1 und B2 - Modell 88 00 60

ZUBEHÖR/ERSATZTEILE

Die folgenden Artikel können als Zubehör- oder Ersatzteile für Ihr Absauggerät separat bezogen werden.

Beide Modelle	
Beschreibung	Teilenr.
Externes Batterieladegerät (nicht gezeigt)	88 00 70 04
Wiederaufladbare Batterie hoher Kapazität, 12-Volt DC Ni-MH-Batterie	88 00 70 05
Angebundener Stopfen	88 00 70 06
Ersatzbatteriefach	88 00 70 07
AC/DC-Adapter/Ladegerät	88 44 00
Netzkabel USA	88 44 01
Netzkabel von „Hospital-Grade“-Qualität USA	88 44 02
Netzkabel Großbritannien	88 44 03
Netzkabel EU	88 44 04
12-Volt-DC-Kabel	88 45 00
Aufspannvorrichtung für Unterdruckmesser (nicht gezeigt)	88 50 00

Modell 88 00 50	
Beschreibung	Teilenr.
Kniestück zum Schlauchanschluss an das Gerät	88 00 50 02
800-ml-Einwegbehälterpackung (inkl. Behälter, Deckel, Filter, Behälterkniestück, Patientenschlauch und Kniestück zum Anschluss des Schlauches an das Gerät)	88 00 50 04
Haltebügel für Behälter (zur Verwendung mit 800-ml-Behälter)	88 00 50 06
Tragetasche mit Schultergurt, 800 ml	88 46 00
800-ml-Einwegbehälter (Packung à 48)	88 47 01
800-ml-Einwegbehälter (Packung à 6)	88 47 03
Bakterienfilter (Packung à 12 für 800-ml-Behälter)	88 49 01
1,8 m langer Patientenschlauch (für 800-ml-Behälter)	88 49 03
90°-Kniestück für den Anschluss des Schlauchs am Behälter (zur Verwendung mit 800-ml-Behälter)	88 49 04
Verbindungsschlauch (Packung à 6 zur Verwendung mit 800-ml-Behälter)	88 49 05
Modell 88 00 60	
Beschreibung	Teilenr.
Tragetasche mit Gurt, 300 ml	88 00 60 05
300-ml-Einwegbehälter mit Patientenschlauch (Packung à 10)	88 60 00