

Schnellverschlussdeckel zu Stäubli Mehrwegsystem



Der Stäubli-Schnellverschlussdeckel vereint alle vorteilhaften Eigenschaften, die ein solcher Deckel aufweisen kann. Dank einfachster Konstruktion aus Leichtmetall und rostfreiem Stahl ist er mechanisch fast unverwüsthlich. Die rostfreie Haltefeder hält den Deckel absolut sicher und dicht auf der Sekretflasche.

Geringes Gewicht, einfachste Handhabung und einfaches Reinigen sind weitere Vorteile dieses Deckels.

Mit dem Thoraxrohreinsatz (nur für Deckel mit 15mm Öffnung auf der Patientenseite) lässt sich aus einem 2 Liter Absaugbehälter auf einfache Weise ein Wasserschloss bauen.

Der Schnellverschlussdeckel ist als Bestandteil eines modularen Systems und lässt sich in diversen Varianten kombinieren.

Bedienung:

- Die Vakuum- und Sekretschläuche werden mit unverwechselbaren Stecknippeln angeschlossen.
- Aufsetzen des Deckels: Haltefeder zusammendrücken, Deckel aufsetzen, Haltefeder loslassen.
- Abheben des Deckels: Haltefeder zusammendrücken, Deckel abheben, Haltefeder loslassen.

Technische Daten:

Material:	Anticorodal, rostfreier Stahl
Vakuumananschluss:	9mm Stecknippel
Sekretanschluss (Patient):	11mm oder 15mm Stecknippel (je nach Variante)
Dichtung:	Flachdichtung Silikon
Überlaufsicherung:	eingebaute Kugelüberlaufsicherung
Gewicht:	800g
Oberfläche:	Eloxieret und beschriftet (sehr leicht zu reinigen)
Desinfektion:	Schnellverschlussdeckel können in geeignete Desinfektionsmittel eingelegt oder in geeigneten Waschmaschinen gewaschen werden.

Varianten Traggriff / Aufhängung:



Variante mit Traggriff

Sekretbehälter steht in einem Flaschenhalter, Deckel wird aufgesetzt

Varianten 8071cXX



Variante mit Einhängprofil für Schiene 8x35mm

Der Deckel wird an einer Profilschiene montiert und der Sekretbehälter dann am Deckel eingehängt

Varianten 8071XX



Variante für Universalhalter

Der Deckel wird am Universalhalter (8088) eingesteckt und der Sekretbehälter dann am Deckel eingehängt

Varianten 8071kXX ohne Uni-halter
 Varianten 8071bXX mit Uni-halter

Stecknippelvarianten für Patientenseite:



11mm
 für Schlauch 7-9mm ID
 ArtNr: 8071f



15mm
 für Schlauch 6-7mm ID
 ArtNr:8078b



15mm
 für Schlauch 7-9mm ID
 ArtNr: 8078



15mm
 für Schlauch 10-12mm ID
 ArtNr: 8078a

ID = Innendurchmesser des Schlauchs

Schnellverschlussdeckel als Wasserschloss:

Thoraxrohreinsatz

Mit dem Thoraxrohreinsatz kann aus jedem Schnellverschlussdeckel mit Patientenseitigen 15mm Anschluss und einem 2l Sekretbehälter ein Wasserschloss gebaut werden.

ArtNr: 8086 (nur Thoraxrohreinsatz)



Schnellverschlussdeckel mit Thoraxrohreinsatz

Schnellverschlussdeckel mit Stecknippel 9mm (Vakuumseite) und Thoraxrohreinsatz als patientenseitiger Abgang.

ArtNr: 8071w mit Einhängprofil für Schiene 8x35mm
 ArtNr: 8202 mit Universalhalter

Absaugkanülen zur oralen Anwendung, Absaugkatheter, Curetten




Absaugkanülen zur oralen Anwendung

Die Absaugkanülen zur Anwendung im Mundraum der Max Stäubli AG sind aus verchromtem Messing gefertigt.

Katheterköcher, Spühlbecher, Tablare und Körbe für Schiene



Wir haben in unserem Sortiment diverse Tablare und Gerätekörbe für das Schinensystem. Sie werden je nach Kundenwunsch mit einem der folgenden Haltesystemen ausgerüstet:

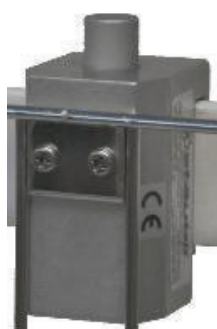

Universalhalter



Einhängeprofil ohne Arretierung



Einhängeprofil
mit Feststellschraube

Falls wir nichts im Angebot haben dass ihren Bedürfnissen entspricht dann fragen sie einfach. Wir fertigen auch gerne Tablare oder Körbe nach Kundenwunsch.

Reinigungswerkzeug



Reinigungspistole für Druckluft aus hochwertigem Edelstahl Autoklavierbar bis 134°C, RDG (Reinigungs- und Desinfektionsgerät) tauglich

Die Vorteile liegen in ihrer Beständigkeit gegen VE-Wasser (demineralisiertes Wasser, kalt) sowie der möglichen Aufbereitung im RDG und der Sterilisation. Damit können die Pistolen auch im reinen Bereich einer ZSVA bzw. in einer Endoskopieabteilung verwendet werden.

Die Reinigungspistole ist das ideale Werkzeug für die (Vor)-Reinigung von Laborgläsern, Pipetten, Spritzen, Kathetern, Küvetten, Kanülen und anderen Gegenständen in Klinik, Labor und Praxis also überall dort, wo es auf höchste Sauberkeit und Hygiene ankommt.

Wartungsfreundlich

Die Druckluftpistole kann ohne Werkzeug zerlegt und wieder zusammengesetzt werden. Dadurch können auch alle Teile ohne Werkzeug ersetzt werden.

Verschiedene Düsen bieten viele Einsatzmöglichkeiten

Durch die vier mitgelieferten Düsenaufsätze werden viele Möglichkeiten abgedeckt. Mit Hilfe der Luer- und der Luer-Lock-Düse können zum Beispiel Schläuche mit Luerkupplung aufgesteckt und somit inwendig ausgeblasen und getrocknet werden.

Lieferbare Schlauchlängen: 1, 1.5 und 2m

11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020

11.1 Absaugsysteme Einweg

11.1.1 Sekretbehälter, Sekretbeutel Einwegsystem

11.1.2 Halter zu Einweg Absaugsystemen

11.2 Absaugsysteme Mehrweg

11.2.2 Halter zu Mehrwegsystem

11.3 Schnellverschlussdeckel zu Stäubli Mehrwegsystem

11.3.1 Schnellverschlussdeckel, mit Tragegriff 4x20mm

11.3.2 Schnellverschlussdeckel, mit Traggriff 5x25mm und Schienenhalter

11.3.3 Schnellverschlussdeckel, mit Traggriff 5x25mm ohne Schienenhalter

11.3.4 Schnellverschlussdeckel, mit Traggriff 5x25mm und Universalhalter

11.3.5 Spezial - Schnellverschlussdeckel

11.3.6 Schnellverschlussdeckel Zubehör



11.4 Stecknippel, Schlauchverbinder, Schlauchadapter

11.4.1 Stecknippel Absaugen, Vakuum

11.4.2 Ventile Absaugen, Vakuum

11.4.3 Stecknippel und Verbinder für Sauerstoff, Air und Befeuchterflaschen

11.4.4 Schlauchverbinder gerade (I-Stück)

11.4.5 Schlauchverbinder 3 fach (Y-Stück)

11.4.6 Schlauchadapter

11.5 Schläuche zu Absaugsystemen

11.5.1 Konfektionierte Schläuche Absaugen (mit Trichter, Ventil, etc)

11.5.2 PVC-Schläuche (meterware)

11.5.3 Silikon-Schläuche (meterware)

11.6 Absaugkanülen zur oralen Anwendung, Absaugkatheter, Curetten

11.6.1 Absaugkatheter

11.6.2 Absaugkanülen zur oralen Anwendung

11.6.3 Curetten



11.7 Bakterienfilter Vakuum

11.7.1 Bakterienfilter zu Vakuumregler und Stäubli Absauggeräte

11.7.2 Bakterienfilter zu Geräten anderer Hersteller

11.8 Überlaufsicherungen

11.8.1 Überlaufsicherungen zu Universal, Univac, Minivac

11.8.2 Überlaufsicherungen zu Stäubli Vakuumregler

11.9 Nasenbrillen, Masken und Sauerstoffkatheter für Sauerstofftherapie

11.9.1 Nasenbrillen

11.9.2 Sauerstoffmasken

11.9.3 Sauerstoffkatheter

11.10 Befeuchtergruppen Sauerstofftherapie

11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020

Seite 2

- 11.10.1 Befeuchtergruppen für Entnahmestellen und Flaschenventile
- 11.10.2 Befeuchtergruppen für Sauerstoffkonzentratoren
- 11.10.3 Steriles Wasser

11.11 Sauerstoffkonzentratoren Verbrauchsmaterial und Zubehör

- 11.11.1 NewLife / QuietLife
- 11.11.2 VisionAire
- 11.11.3 Kröber O2 und 4.0
- 11.11.4 EverFlo
- 11.11.5 Simply Go

11.12 Trichterschläuche für Air und Sauerstoff

11.13 Medikamentenvernebler für Aerosoltherapie


- 11.13.1 Medikamentenvernebler Set, Komplett
- 11.13.2 Medikamentenvernebler Einzelteile

11.14 Luftbefeuchter Verbrauchsmaterial und Zubehör

- 11.14.1 Befeuchter Allgemein
- 11.14.2 Offenes System
- 11.14.3 Geschlossenes System
- 11.14.4 Steriles Wasser für Befeuchter

11.15 Katheterköcher, Spühlbecher, Tablare und Körbe für Schiene

- 11.15.1 Spühlbecher
- 11.15.2 Katheter-Köcher, -Körbe
- 11.15.3 Tablare für Schiene
- 11.15.4 Gerätekörbe für Schiene
- 11.15.5 Schiene für Montage an Rohr oder Fahrgestell

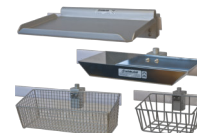

11.16 Reinigungswerkzeug



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020

Seite 3

11.1 Absaugsysteme Einweg

11.1.1 Sekretbehälter, Sekretbeutel Einwegsystem

57157 Serres-Absaugbeutel 1-Liter, mit Winkel für Einwegsystem
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



57557 Serres-Absaugbeutel 1-Liter, mit Winkel und integriertem Geliermittel zu LSU
Absaugeinheit Einwegsystem

57308 Serres Kanister 1 Liter, autoklavierbar, mit Winkel, zu Einwegsystem



9016d Serres Absaug-System für Universal, Univac
mit Flasche, Sekretnack 1-Liter, kompl., mit Universalhalter



57167 Serres-Absaugbeutel 2-Liter, mit Winkel für Einwegsystem

57328 Serres Kanister 2 Liter, autoklavierbar, mit Winkel, zu Einwegsystem

57587-0 Serres-Absaugbeutel 3-Liter, mit Winkel 7.2mm und integriertem Geliermittel

57348 Serres Kanister 3 Liter, autoklavierbar, mit Winkel 7,2mm, zu Einwegsystem

11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020

Seite 4

8070c

Monovac Sekret-Sack 6mm mit Überlaufsicherung, grün
Ref.MiGel 01.02.01.01.2



8070c2

Monovac Sekret-Sack, 9mm, mit hydrophobem Filter - gelb
Ref.MiGel 01.02.01.01.2



8070b

2 Liter Flasche Polysulphon zu Monovac Sekret-Sack
Ref.MiGel 01.02.01.01.2



8088a

**Monovac Absaug-System für Universal, mit Flasche und
Sekretsack 2-Liter komplett,
mit Halter**



7305D-632

**Einmalsekretbehälter 800ml zu Vacu-Aide QSU mit Deckel,
Bakterienfilter und
Verbindungsschlauch zu Pumpe / Behälter.**



LA886100

**Einwegbehälter 300ml für LCSU 4 mit Patientenschlauch
90cm**



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 5

LA886102 **Einwegbehälter 800ml für LCSU 4**
ein Stück
Lieferumfang: Verbindungsschlauch, Patientenschlauch 1.8m,
Behälter mit Deckel



LA886104 **Einwegbehälter 800ml für LCSU 4 (6 Stk.)**
Packung mit 6 Stück
Lieferumfang: 6 Verbindungsschläuche, 6 Patientenschlauche 1.8m, 6
Behälter mit Deckel



SC75001E **Einwegbehälter 300ml zu Spencer Jet**
Lieferumfang: Einwegbehälter 300ml, Einweg-Patientenschlauch 1m

11.1.2 Halter zu Einweg Absaugsystemen

8088 **Universalhalter mit T-Profil 5x25mm für Monovac
Sekretflaschen**



8088b **Universalhalter mit T-Profil 30x5mm für Serres
Sekretflaschen**



8088c **Halter zu Vacuson für Monovac System
(Einwegsekretbeutel)**



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 6

11.2 Absaugsysteme Mehrweg

11.2.2 Halter zu Mehrwegsystem

8046 Flaschenhalter mit Einhängprofil für Schiene 8x35 für 1-L-Flasche

8047 Flaschenhalter zum Schrauben für 1 Liter Flasche

8050 Flaschenhalter für Schiene 8x35 zu 2 Liter Flasche



8051 Flaschenhalter zum Schrauben für 2 Liter Flasche



8052 Flaschenhalter für Schiene 8x35 zu 3 Liter Flasche

8053 Flaschenhalter für Schiene 8x35 zu 5 Liter Flasche



8061g Flaschenhalter für Schiene 8x35 zu 4 Liter Flasche Poly



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 7

11.3 Schnellverschlussdeckel zu Stäubli Mehrwegsystem

11.3.1 Schnellverschlussdeckel, mit Tragegriff 4x20mm

8071c11 Schnellverschlussdeckel (11mm) komplett mit Traggriff
4x20mm und 2 Nippel
(8071h+8071f)



8071c15 Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett mit Traggriff
4x20mm ohne Nippel



8071c15a Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett mit Traggriff
4x20mm und 2 Nippel
(8071h+8078b)



8071c15b Schnellverschlussdeckel (15 mm) komplett mit Traggriff
4x20mm und 2 Nippel
(8071h+8078)



8071c15c Schnellverschlussdeckel (15 mm) komplett mit Traggriff
4x20mm und 2 Nippel
(8071h+8078a)



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020

Seite 8

11.3.2 Schnellverschlussdeckel, mit Traggriff 5x25mm und Schienenhalter

807111 Schnellverschlussdeckel (11mm) komplett mit Traggriff und Profilschienenhalter
für Schiene 8x35, mit 2 Nippel (8071h + 8071f)



807115 Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett mit Traggriff und Profilschienenhalter
für Schiene 8x35, ohne Nippel



807115a Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett mit Traggriff und Profilschienenhalter
für Schiene 8x35, mit 2 Nippel (8071h + 8078b)



807115c Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett mit Traggriff und Profilschienenhalter
für Schiene 8x35, mit 2 Nippel (8071h + 8078)



807115d Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett mit Traggriff und Profilschienenhalter
für Schiene 8x35, mit 2 Nippel (8071h + 8078a)



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020

Seite 9

11.3.3 Schnellverschlussdeckel, mit Traggriff 5x25mm ohne Schienenhalter

**8071k11 Schnellverschlussdeckel (11mm) komplett mit Traggriff
5x25mm, mit 2 Nippel**
(8071h+8071f) Ohne Schienenhalter



**8071k15 Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett mit Traggriff
5x25mm, ohne Nippel**



**8071k15a Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett m.Traggriff
5x25mm, ohne Schienenhalter,**
mit 2 Nippel (8071h+8078b)



**8071k15b Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett mit Traggriff
5x25mm, mit 2 Nippel**
(8071h+8078)



**8071k15c Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett mit Traggriff
5x25mm, mit 2 Nippel**
(8071h+8078a)



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 10

11.3.4 Schnellverschlussdeckel, mit Traggriff 5x25mm und Universalhalter

8071b11 Schnellverschlussdeckel (11mm) komplett mit Traggriff u.verstellbarem Uni-Halter
Universalhalter, mit 2 Nippel (8071h+8071f)



8071b15 Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett mit Traggriff und verstellbarem
Universalhalter, ohne Nippel



8071b15a Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett mit Traggriff und verstellbarem
Universalhalter, mit 2 Nippel (8071h+8078b)



8071b15b Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett mit Traggriff und verstellbarem
Universalhalter, mit 2 Nippel (8071h+8078)



8071b15c Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett mit Traggriff und verstellbarem
Universalhalter, mit 2 Nippel (8071h+8078a)



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 11

11.3.5 Spezial - Schnellverschlussdeckel

8071w

**Schnellverschlussdeckel (15mm) komplett mit
Einhängeprofil für Schiene 8x35mm**
als Wasserschloss und Thoraxrohreinsatz



8200

**Schnellverschlussdeckel (15mm) mit Einhängeprofil für
Schiene 8x35mm als**
Wasserschloss und Thoraxrohreinsatz, mit Sekretflasche 2-Liter (Glas)



8201

**Schnellverschlussdeckel (15mm) mit Einhängeprofil für
Schiene 8x35mm als**
Wasserschloss und Thoraxrohreinsatz, mit Sekretflasche 2-Liter
(Polysulphon)



8202

**Schnellverschlussdeckel (15mm) mit
Universalschienenhalter als**
Wasserschloss und Thoraxrohreinsatz



8203

**Schnellverschlussdeckel (15mm) mit
Universalschienenhalter als**
Wasserschloss und Thoraxrohreinsatz mit Sekretflasche 2-Liter (Glas)



8204

**Schnellverschlussdeckel (15mm) mit
Universalschienenhalter als**
Wasserschloss und Thoraxrohreinsatz mit Sekretflasche 2-Liter
(Polysulphon)



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 12

11.3.6 Schnellverschlussdeckel Zubehör

8086 Thoraxrohreinsatz kompett



8099 Universalhalter mit T-Profil 25x5mm für Schnellverschlussdeckel
Universalhalter zu Schnellverschlussdeckel mit Traggriff 5x25mm ohne Einhängprofil

11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 13

11.4 Stecknippel, Schlauchverbinder, Schlauchadapter

11.4.1 Stecknippel Absaugen, Vakuum

8071h **Stecknippel Aluminium 9mm Schlauch-Innendurchmesser
6-8mm**
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



8071f **Stecknippel Aluminium 11mm, Patientens.
Schlauch-Innendurchmesser 7-9mm**



8078b **Stecknippel Aluminium 15mm Schlauch-Innendurchmesser
6-7mm**



8078 **Stecknippel Aluminium 15mm Schlauch-Innendurchmesser
7-9mm**



8078a **Stecknippel Aluminium 15mm Schlauch-Innendurchmesser
10-12mm**



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 14

22235a Stecknippel Vakuumanschluss 9mm gerade für
Schl.ø6-8mm, Kunststoff, unsteril,



22235b Stecknippel, Kunststoff grün Schlauchanschluss 8 mm
gerade, Konus-Durchmesser 9 mm



8071e Stecknippel Sekretanschluss 11mm gerade für
Schl.ø7-8mm, Kunststoff PVC grau



11.4.2 Ventile Absaugen, Vakuum

13203a Vakuum-Stop-Ventil Erwachsene + Halter



13211 Fingertip, PVC, steril



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 15

11.4.3 Stecknippel und Verbinder für Sauerstoff, Air und Befeuchterflaschen

100907 Schlauchverbinder mit Drehgelenk für O₂ (U-V), 4x4mm
Ref.SL 1220-0



100908 FireSafe Schlauchverbinder mit integriertem
Rückschlagventil
unterbricht den Gasdurchfluss, wenn die nachgelagerte
Schlauchleitung entzündet wird



22235 Stecknippel zu Befeuchterflasche 9mm gerillt, Kunststoff,
unsteril
für Trichterschläuche ø5-7mm



11.4.4 Schlauchverbinder gerade (I-Stück)

11081 Schlauchverbinder 7x7 für ø7-10mm Polyamid



11081a Schlauchverbinder 4/4 (Polyamid) für ø 4.5-7mm
Ref.MiGeL 14.10.20.00.2



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 16

11081c Schlauchverbinder 4x7 für ø4.5-5/ø7-10mm, Polyamid



11081d Schlauchverbinder 4x7 für ø4.5-5/ø7-10mm

11082a Schlauchverbinder 7/10 (Polyamid)
Mindest-Abnahme: 10Stk.

11181 Schlauchverbinder 7x7 für ø7-10mm, Polypropylen
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



11181a Schlauchverbinder 4x4 für ø4.5-5mm, Polypropylen
Ref.MiGeL 14.10.20.00.2



11181b Schlauchverbinder 12x12 für ø11-12mm, Polypropylen

11181c Schlauchverbinder 4x7 für ø4.5-5/ø7-10mm, Polypropylen



11182a Schlauchverbinder 7x10 für ø7-10/ø10-14mm, Polypropylen



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 17

11182b Schlauchverbinder 10x10 für ø10-14mm, Polypropylen



152715 Schlauchverbinder gerade, 9-13mm aus PP
achat minimum: 10pièces


351 Schlauchverbinder für ø8-9/ø4-9mm, Polypropylen



700150630 Schlauchverbinder 4x4mm Portex

11.4.5 Schlauchverbinder 3 fach (Y-Stück)


11180 Schlauchverbinder Y 7x7x7 für ø6-8mm, Polypropylen

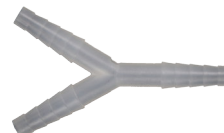

11180a Schlauchverb. Y 11x11x11 für ø10-11mm, Polypropylen



11180b Schlauchverbinder Y 9x9x9 für ø8-10mm, Polypropylen

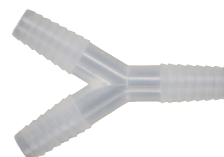

11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 18

11180c Schlauchverbinder Y AD: 12mm ID: 7mm gerade

11180d Schlauchverbinder Y AD: 10mm ID: 5.7mm gerade

11.4.6 Schlauchadapter

22421b Schlauchtülle 6mm - Set bestehend aus: Überwurfmutter G 1/2", O-Ring und 6mm Schlauchtülle



22422a Schlauchtülle 8mm - Set bestehend aus: Überwurfmutter G 1/2", O-Ring und 8mm Schlauchtülle



22423b Adapter zu G1/2" Befeuchtergruppe auf G9/16" Sterilwasserabgang inkl. Nylondichtung



F0025-1 Adapter schwarz, Plastik, komplett für O2 Anschluss 9/16"



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 19

11.5 Schläuche zu Absaugsystemen

11.5.1 Konfektionierte Schläuche Absaugen (mit Trichter, Ventil, etc)

**1301.2100.83 Absaugschlauch (Einweg) CH25, 2.1m, 2 Trichter, unsteril
US**
zu Absaugpumpen und Absaugsystem Serres



**2036 Absaugschlauch (Einweg) 2.1m, mit Trichter und
Fingertipp, unsteril**
zu Absaugpumpen und Absaugsystem Serres, ID:7mm, AD:10mm
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



11.5.2 PVC-Schläuche (meterware)

2005 Kunststoffschlauch farblos, glasklar 7x11mm



2000 Kunststoffschlauch, farblos, glasklar 3x5mm

2001 Kunststoffschlauch, farblos, glasklar 3x6mm

2002 Kunststoffschlauch, farblos, glasklar 5x8mm

2003 Kunststoffschlauch farblos, glasklar 6x10mm

2004 Kunststoffschlauch farblos, glasklar 6x12mm

2006 Kunststoffschlauch farblos, glasklar 10x15mm

2007 Kunststoffschlauch, Curetten, farblos, glasklar 9x13mm

11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 20

2010 Kunststoffschlauch weiss PVC 8x12/2mm

11.5.3 Silikon-Schläuche (meterware)

2018 Silikonschlauch autoklavierbar 2x4mm (2x1)



2020 Silikonschlauch autoklavierbar 5x8mm für Wasserzufuhr



2021 Silikonschlauch autoklavierbar 6x10mm (6x2)



2022 Silikonschlauch autoklavabel, 8x14mm (8x3)



2023 Silikonschlauch autoklavierbar 10x16mm (10x3)



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 21

2024 Silikonschlauch autoklavierbar natur für Saugglocken
6x12mm



2025 Silikonschlauch autoklavierbar 7x11mm (7x2)



2026 Silikonschlauch autoklavierbar 5x9mm (5x2)



2027 Silikonschlauch autoklavierbar 8x12mm (8x2)



2028 Silikonschlauch autoklavierbar 6x9mm (6x1.5)



2029 Silikonschlauch autoklavierbar 7x12mm, (7x2.5)



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 22

2030 Silikonschlauch autoklavierbar 9x13mm (9x2)



2031 Silikonschlauch autoklavierbar 9x14mm (9x2.5)



2034 Silikonschlauch autoklavierbar 9x15mm (9x3mm)



2035 Silikonschlauch autoklavierbar 1,5 x 0,5mm



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 23

11.6 Absaugkanülen zur oralen Anwendung, Absaugkatheter, Curetten

11.6.1 Absaugkatheter

24149 Absaugkatheter gerade 2 Augen CH 08,50cm Farbe blau



24150 Absaugkatheter gerade 2 Augen CH10 50cm - Farbe schwarz



24150a Absaugkatheter gebogen weich 2 Augen CH10, 50cm - Farbe schwarz

24150b Absaugkatheter gerade 2 Augen CH10, 28cm - schwarz - Tracheostoma

24151 Absaugkatheter gerade 2 Augen CH12 50cm - Farbe weiss



24152 Absaugkatheter gerade 2 Augen CH14 50cm - Farbe grün



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 24

24152a Absaugkatheter gebogen weich 2 Augen CH14 50cm -
Farbe grün



24153 Absaugkatheter gerade 2 Augen CH18 50cm - Farbe rot



24154 Absaugkatheter gerade 2 Augen CH16 50cm - Farbe orange



11.6.2 Absaugkanülen zur oralen Anwendung

13204 Kupplungsstück für Schläuche mit ø 6-8mm



13205 Saugkanüle fein ø2/3mm gebogen mit Konus, L=90mm,
unsteril



13206 Saugkanüle grob ø3/5mm gebogen mit Konus, L=90mm,
unsteril



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 25

13207 Saugkanüle grob $\varnothing 3/5$ mm gerade mit Konus, L=95mm, unsteril



13207a Saugkanüle fein $\varnothing 2/3$ mm gerade mit Konus, L=95mm, unsteril



13208 Saugkanüle grob 3x4mm gebogen mit Schlauchansatz



13209 Saugkanüle fein, lang $\varnothing 2/3$ mm gebogen mit Konus, L=175mm, unsteril



13210 Saugkanüle grob, lang $\varnothing 3/5$ mm gebogen mit Konus, L=175mm, unsteril



13212 Handstück Yankauer 4 Augen 27cm, Siebspitze CH22, ohne Vakuumkontrolle



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020

Seite 26

13213 Handstück Yankauer 4 Augen 27cm, Siebspitze CH18, ohne
Vakuumpkontrolle



11.6.3 Curetten

6101 Einmal-Curette, Plastik 8mm, blau (VPE 36 Stk.)



6102 Einmal-Curette, Plastik 10mm, grün (VPE 36 Stk.)



6104 Einmal-Curette, Plastik 12mm, gebogen Mediman (VPE
40Stk.)

11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 27

11.7 Bakterienfilter Vakuum

11.7.1 Bakterienfilter zu Vakuumregler und Stäubli Absauggeräte


40000 **Bakterienfilter zu allen Absauggeräten Ref.MiGeL**
01.02.01.01.2



8356 **Suction Filter 50mm**
1 Packung mit 50 Stück



8356a **Bakterienfilter Durchmesser 50mm 1Blatt**

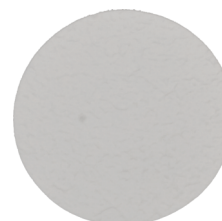

8356b **Bakterienfilter zum Stecken TM Inhalt: 10Stk./VPE, Lot N°**



11.7.2 Bakterienfilter zu Geräten anderer Hersteller

LA781200 **Aerosolfilter mit Schlauch zu LSU neue Version**
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 28

7305D-608 **Bakterienfilter zu Vacu-Aide QSU mit Mehrwegbehälter**



LA781003 **Aerosol-Filter zu LSU, 1 Stk. alte Version**
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020

Seite 29

11.8 Überlaufsicherungen

11.8.1 Überlaufsicherungen zu Universal, Univac, Minivac

11101a Automat. Überlaufsicherung mit Aluminium Schraubdeckel



11101c1 Automatische Überlaufsicherung Metall mit Schienenhalter
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



11102 Schraubbecher für Überlaufsicherung aus Kunststoff



8060 Halter zu Überlaufsicherung und Überlaufflasche 2,5 dl
(f.Schiene 8x35)
mit Einhängeprofil



8061 Halter zu Überlaufsicherung und Überlaufflasche 2,5 dl
(zum Schrauben)



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 30

11.8.2 Überlaufsicherungen zu Stäubli Vakuumregler

8352 Sicherheitssekretflasche 500ccm



8356c Deckel Alu komplett für Überlaufvorrichtung



8360 Sicherheitssekretflasche 300ccm



8391 Überlaufvorrichtung 300ccm komplett (Flasche, Deckel Alu, Bakterienfilter)



8393 Überlaufvorrichtung 500ccm komplett (Flasche, Deckel Alu, Bakterienfilter)



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 31

11.9 Nasenbrillen, Masken und Sauerstoffkatheter für Sauerstofftherapie

11.9.1 Nasenbrillen

22125 Sauerstoff-Brille Elios



22126 Sauerstoff-Brille Collier HU1104, Erw. Schlauch 210cm
Ref.MiGeL 14.10.20.00.2



22129 Demand O2 Brille SalterLabs, Erwachsene Schlauch 2.1m

22130 Sauerstoff-Brille Erw., Softec Nasal HU-41820

22131 Sauerstoff-Nasenbrille Salter Labs, gebogen, SOFT,
Erw., Schlauch 2.1m

11.9.2 Sauerstoffmasken

22104 Sauerstoffmaske Erwachsene, 40-60% mit Schlauch 2.10m,
HU1041
Ref.MiGeL 14.10.20.00.2



22105 Sauerstoffmaske Erwachsene, 60-80% mit Schlauch und
Reservoir, HU41007



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 32

22106 Sauerstoffmaske Kind HU41042 mit Anschlussschlauch



22107 Sauerstoffmaske Erwachsene 80-90% mit Schlauch und Reservoir HU41059




22107b Sauerstoffmaske Erwachsene 80-90% mit Schlauch und Reservoir HU1059, mit Nicht-Rückatemmaske und Sicherheitsventil




11.9.3 Sauerstoffkatheter

22127 Sauerstoff-Katheter mit Kompresse CH10, DM = 3,3mm, L = 40cm (VPE 100Stk.)

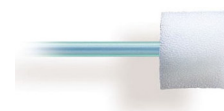

22127a Sauerstoff-Katheter mit Kompresse CH12, DM = 3,3mm, L = 40cm (VPE 100Stk.)

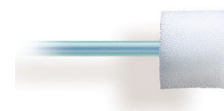

22128 Sauerstoff-Katheter ohne Kompresse

11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 33

11.10 Befeuchtergruppen Sauerstofftherapie

11.10.1 Befeuchtergruppen für Entnahmestellen und Flaschenventile

22230b Befeuchtergruppe 500ml mit Alu-Kopf kpl. 1/2", mit Nippel gerillt (22235)



22231 Befeuchterflasche 500ml



22239a Befeuchterkopf mit Sprudler komplett Alu



11.10.2 Befeuchtergruppen für Sauerstoffkonzentratoren

1009144 Sauerstoff-Verbindungsschlauch zu OXYSTEM und VisionAire, 0,4m



23201 Befeuchtergruppe komplett zu Sauerstoff-Konzentrator bis 5 l/min



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 34

23201a

Befeuchtergruppe 02 6 bis 15l/min (high flow)

mit Deckel weiss und 9/16" Eingang und Überdruckventil 6 psi



11.10.3 Steriles Wasser

400301

Steriles Wasser 325ml (VPE: Karton à 20 Stk.)

Pharmacode: 2955795 / Ref.MiGeL 14.10.20.00.2



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 35

11.11 Sauerstoffkonzentratoren Verbrauchsmaterial und Zubehör

11.11.1 NewLife / QuietLife

23210 Filtermatte zu Sauerstoffkonzentrator NewLife/QuietLife



11.11.2 VisionAire

FI202-2 Grobstaubfilter Griff-seitig für O2 Konzentrator VisionAire (Set à 2Stk.)



11.11.3 Kröber O2 und 4.0

23210d Feinstaubfilter rund, weiss m. Anschluss 22F22M, Kröber O2 Konzentrator



5504 Grobstaubfilter AEROvent Kröber O2/4.0



KRO2.02 Winkelstück für Befeuchtergruppe Kröber O2 und 4.0



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020

Seite 36

11.11.4 EverFlo

23210g **AEROvent Feinstaubfilter Intake für O2 Konzentrator
Respironics EverFlo**



11.11.5 Simply Go

1082662 **Batterie zu SimplyGo**

900-118 **Ladegerät für externen Akku zu SimplyGo**

11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 37

11.12 Trichterschläuche für Air und Sauerstoff

20514 Inhalierschlauch 2.1m HU 1115 Air und O2
Ref.MiGeL 14.01.01.00.2 / 14.10.20.00.2



20514a O2 Verbindungsschlauch 4.2m HU 41118 Air und O2, mit 2 Konnektoren
Ref.MiGeL 14.01.01.00.2 / 14.10.20.00.2



20514b O2 Verbindungsschlauch 7.5m, HU-41119, für Air und O2 mit 2 Konnektoren
Ref.MiGeL 14.01.01.00.2 / 14.10.20.00.2



20514c O2 Sicherheitsschlauch 9.14m mit 2 Konnektoren
Ref.MiGeL 14.10.20.00.2



20514e O2 Verbindungsschlauch 15.2m, HU-41120, für Air u.O2 mit 2 Konnektoren/Starlumen
Ref.MiGeL 14.01.01.00.2 / 14.10.20.00.2



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 38

11.13 Medikamentenvernebler für Aerosoltherapie

11.13.1 Medikamentenvernebler Set, Komplett

20513 **Medikamentenvernebler mit Mundstück und T-Stück
HU41897**



20515 **Verneblerset mit Maske, Vernebler, Schlauch, Abgang
unten, HU41893**

Ref.MiGeL 14.01.01.00.2 / 14.01.01.01.3



20516 **Verneblerset mit Mund- u.T-Stück, mit Schlauch, Abgang
unten, HU41892**

Ref.MiGeL 14.01.01.00.2 / 14.01.01.01.3



11.13.2 Medikamentenvernebler Einzelteile

20511 **Medikamentenverneblertopf**



20395 **Mundstück HU41565**



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020

Seite 39

20398 T-Adapter für Vernebler HU41639



20397 Aerosolmaske Kind HU41085



20512 Aerosolmaske Erwachsene HU 1083
Ref.MiGeL 14.01.01.00.2



**20512b Tracheostomiemaske für Erwachsene für Aerosoltherapie
bei Tracheo- und
Laryngektomie**

11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 40

11.14 Luftbefeuchter Verbrauchsmaterial und Zubehör

11.14.1 Befeuchter Allgemein

20751 Spiralschlauch zu USV, 90cm (Patientenschlauch)



20770 Spiralschlauch für Luftzufuhr (30cm)




20751a Spiralschlauch Rolle à 50 Meter zum Zuschneiden
(Patient/Luft)
Ref.MiGeL 31.05.01.00.1

20752 Bakterienfilter für Luftbefeuchter USV
Ref.MiGeL 31.05.01.00.1



20785 Filtermatte für Staubfilter zu USV Ref.MiGeL 31.05.01.00.1

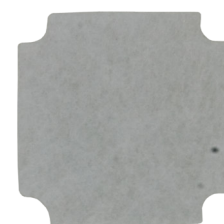

20728a Verneblerkammer mit Schwimmerschalter (ohne Deckel),
mit Schwinger TU 26x




11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 41

3209 Spiralschlauch Silikon (600x22mm) Ultrasonic (Patientenschlauch)



3218 Spiralschlauch Silikon (300x22mm) Ultrasonic (Luftzufuhr)

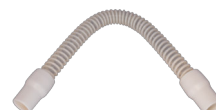

11.14.2 Offenes System

20753 Schlauchsystem zu Luftbefeuchter für offenes System bestehend aus:
Patientenschlauch (90cm), Schlauch Luftzufuhr (30cm), Bakterienfilter und Intrafix Air



20754 Schlauchsystem zu Luftbefeuchter für offenes System, bestehend aus:
Patientenschlauch, Art.20751 (90cm), Schlauch Luftzufuhr Art.20770 (30cm), Bakterienfilter Art.20752



20756a Intrafix Air Infusionsbesteck zu USV



20778 Kammerdeckel komplett zu USV



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 42

11.14.3 Geschlossenes System

20803 **Befeuchter-Kit zu DP100, mit Wasserzuleitung zum Stecken**
(1Stk.)
ein Stück



20804 **Befeuchter-Kit, zu DP100, mit Wasserzuleitung zum Stecken (10Stk.)**
1 Packung mit 10 Stück



20754a **Schlauchsystem zu Luftbefeuchter für geschlossenes System komplett mit DP**
bestehend aus: Patientenschlauch, Art.20751 (90cm), Schlauch Luftzufuhr Art.20770 (30cm), Bakterienfilter Art.20752, Befeuchterkit DP Art.20803



20798 **Aluminiumring für Befeuchterkit DP für USV**



11.14.4 Steriles Wasser für Befeuchter

20755 **Steriles Wasser "AQUA" 2-Liter / Preisangabe: 1Stk. (VPE 6 Stk.)**



Bank / Banque: Credit Suisse
CH-8810 Horgen
Konto / Compte: 792 800-31, Cl.-Nr. 4355
IBAN: CH28 0483 8079 2800 3100 0
PC / CCP: 80-12322-0
E-Mail: info@maxstaeubli.ch
Webseite: www.maxstaeubli.ch

MEDIZINISCHE GERÄTE
APPAREILS MÉDICAUX
MEDICAL APPARATUS



Max Stäubli AG Spätzstrasse 14 8810 Horgen Telefon: 044 728 80 40 Fax: 044 728 80 41

11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 43

20755b Steriles Wasser "AQUA" 1 Liter / Preisangabe: 1Stk (VPE 10 Stk.)



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 44

11.15 Katheterköcher, Spülbecher, Tablare und Körbe für Schiene

11.15.1 Spülbecher

4101a Universalhalter komplett mit Ringhalter für Spülbecher



4105 Spülbecher mittel, mit Universal- Ringhalter, L=220mm,
DM=150mm/85mm
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



4105a Spülbecher mittel, ohne Universal- Ringhalter, L=220mm,
DM=120/85mm



11.15.2 Katheter-Köcher, -Körbe

4102 Katheterköcher mit Universalhalter L=500mm, DM=100mm



4102d Katheterköcher mit Universalhalter L=400mm, DM=60mm,
Boden mit 3 Loch DM 6mm
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 45

4102f Katheterköcher mit Universalhalter L=700mm, DM=100mm



4102g Katheterköcher mit Universalhalter L=800mm, DM=100mm



4106a Katheterkorb mit Bügel für Schiene 8x35 100x75x380mm,
aus rostfreiem Stahl
Ref.MiGeL 01.02.01.01.2



4106b Katheterkorb mit 2 Bügeln für Schiene 8x35,
100x75x480mm, aus rostfreiem Stahl



11.15.3 Ablage für Schiene

4103 Ablage-Tablar 210x310mm Aluminium eloxiert, mit 2
Universalhaltern



4103b Instrumentenschale, rostfrei mit Universalhalter
(240x120x30mm)



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 46

4103c Ablage-Tablar 210x310mm Aluminium eloxiert, mit 2x
Einhängeprofil 8x35mm
Carba




11.15.4 Gerätekorbe für Schiene


4106f Geräte Korb, Draht rostfrei, mit Univer- sal-Halter,
190x115x100x80mm
(UH Art.N°8058e)



4106g Geräte Korb, Draht rostfrei, mit Ein- hängeprofil,
190x115x/100x80mm
(EHP Art.N°8075d)

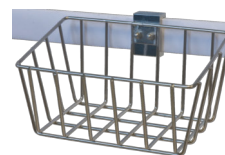


4106h Geräte Korb, Draht rostfrei, mit Ein- hängeprofil,
190x115x/100x80mm
(EHP Art.N°8075d) und Feststellschraube

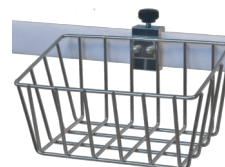

4106i Geräte-Korb konisch, rostfrei, elektro- poliert, mit
Einhängeprofil für Schiene,
mit Feststellschraube, 300/275 x 115/100 x 80/100mm



4106iUH Geräte-Korb konisch, rostfrei, elektro- poliert, mit
Universalhalter für
für Schiene, 300/275 x 115/100 x 80/100mm

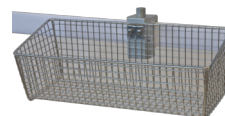

11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 47

11.15.5 Schiene für Montage an Rohr oder Fahrgestell

4207 **Verstellbare Schiene, lang, 400mm**



4207k **Schiene kurz verstellbar 180mm**



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 48

11.16 Reinigungswerkzeug

642082002 Edelstahl Reinigungspistolen-Set Druckluft,

Edelstahl-Schnellverschlusskupplung mit 2m Schlauch, Ende offen,
ohne Werkzeug zerlegbar, autoklavierbar bis 134°C - Klasse B bis 5
bar

Lieferumfang: Luer-Ansatz, Spitzdüse, Brausedüse (blau),
PVC-Gewebeschlauch mit Edelstahl-Pistolenkupplung und freiem
Schlauchende, Silikonöl, Kupplungsschutzkappe und
Kolbenersatzfeder



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 49

8070 Saugflasche 2 Liter Glas



8071b Saugflasche 2 Liter Polypropylen autoklavierbar



11260 Saugflasche 3 Liter Glas



11265 Saugflasche 5 Liter Glas



13112 Saugflasche 1 Liter Glas für Minivac



13132 Saugflasche 2 Liter Glas für Gummistopfen



11) Zubehör - Verbrauchsmaterial

24.01.2020
Seite 50

4466 Saugflasche 4 Liter Polysulfon



7314D-603 Mehrwegabsaugbehälter 1200ml zu Vacu-Aide QSU mit Zubehör



LA784000 Mehrwegkanister kompl.mit Deckel zu LSU



Technische- und Preisänderungen vorbehalten. Die Bilder können vom Artikel abweichen.